

Mikrobac[®] basic

Dezinfekce povrchů



Přípravek na dezinfekci ploch a povrchů, bez aldehydů a aminů, bez vonných přísad a barviv, nezanechává residua.



Mikrobac[®] basic

Vlastnosti přípravku

Mikrobac[®] basic je bezaldehydový, bezaminový přípravek na bázi kvartérních amoniových sloučenin určený pro dezinfekci ploch. Receptura bez vonných a barvicích přísad zaručuje příjemnou práci bez nepříjemných oděrů. Díky synergickému účinku kvartérních amoniových sloučenin a pomocných látek v přípravku Mikrobac[®] basic má tento přípravek velmi dobré reziduální vlastnosti a lze jej bez problémů použít po předchozí aplikaci produktů obsahujících aldehydy nebo aminy.

- bez obsahu aldehydů a aminů
- optimalizované reziduální vlastnosti
- bez vonných přísad a barviv
- dobrý poměr mezi cenou a účinkem

Složení

Účinná látka: benzyl-C12-18- alkyldimethylammonium-chlorid 190 mg/g.

Mikrobiologická účinnost

Baktericidní, fungicidní na kvasinky, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV), účinný proti rotavirům.

Oblasti použití

Mikrobac[®] basic je vhodný k dezinfekci omyvatelných povrchů metodou otření. Tento bezaldehydový a bezaminový přípravek je doporučován především pro oblasti a prostory, kde je žádoucí provádět dezinfekci, která nezanechává pach a rezidua. Pro dezinfekci podlah a dalších ploch v nemocnicích, ambulancích, laboratořích, domovech důchodců apod.

Návod k použití a dávkování

Mikrobac[®] basic se dodává jako koncentrát. Pro přípravu požadovaného pracovního roztoku postupujte podle pokynů k dávkování přípravku a použijte odpovídajících dávkovačů a dávkovacích pomůcek. Omyvatelné povrchy a plochy, které mají být dezinfikovány (např. podlahy) je třeba kompletně navlhčit dostatečným množstvím připraveného pracovního roztoku. Pomůcky na dezinfekci je nutné důkladně omýt vodou.

Mikrobac[®] basic se vyznačuje schopností nezanechávat rezidua. Přípravek neobsahuje aldehydy ani aminy, a proto je možné jej bez problémů použít po předchozí dezinfekci přípravky, které aldehydy či aminy obsahují.

Pokud začnete používat jiný dezinfekční přípravek, doporučujeme vždy nejprve provést pečlivé omytí všech ploch a povrchů (např. přípravkem Dismofix[®] N).

Dezinfekční přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu nebo informační leták přípravku.

HARTMANN-RICO a.s.

Masarykovo nám. 77

664 71 Veverská Bítýška

Tel. (+420) 549 456 120

e-mail: cz.bode@hartmann.info

www.bode.cz

Kompatibilita přípravku

Pracovní roztoky přípravku Mikrobac[®] basic byly podrobeny rozsáhlým testům na materiálovou kompatibilitu. Doporučujeme používat Mikrobac[®] basic na dezinfekci následujících materiálů:

Kovy: nerezová ocel, hliník, měď, mosaz.
Plasty: PA (polyamid), PE (polyethylen), PP (polypropylen), PS (polystyren), PU (polyurethan), PVC (polyvinylchlorid), ABS (acryl-butadiene-stryol), silikon, guma, latex, Macrolon[®], akrylátové sklo, Teflon[®].

Pokud bude přípravek používán správně (dezinfekce otřením), nehrozí žádné poškození materiálů.

Dezinfekce povrchů Dezinfekce otřením	Doba působení / koncentrace			
	ml/l	15 min	30 min	1 h
Baktericidní / fungicidní na kvasinky ¹⁾ - čisté podmínky	7,5		0,75%	
	5			0,5%
Virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV)	5	0,5%		
Rotavirus	2,5	0,25%		

1) Dle nových standardních metod; s mechanickým účinkem.

Chemicko-fyzikální údaje

Barva čirá, lehce nažloutlá
pH hodnota koncentrátu cca 12
pH hodnota 0,5%ního roztoku cca 8,9
hustota (20°C) cca 0,995 g/cm³

Balení

974845 kanistr 5l 1 ks

Označení koncentrátu: C leptavý; N nebezpečný pro životní prostředí. Obsahuje: glutaral, didecylmethylammonium chlorid. Dráždivý. Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgány. Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy. Při odpovídající aplikaci produktu je nutno dbát základních opatření pro ochranu zaměstnanců v souladu s ochranným stupněm 2§9GefStoffV. Mikrobac[®] basic vytváří při teplotách vyšších než je jeho bod vznícení (40°C) explozivní atmosféru. Neuchovávat v blízkosti zápalných zdrojů – nekouřit. Nevdechovat výpary / aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zbytky přípravku i obal zneškodněte dle platných předpisů. Seznamte se se specifickými pokyny / bezpečnostními listy.

Pracovní roztok s povinným označením ≥ 8%: Xi dráždivý. Dráždí oči. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pracovní roztok s povinným označením ≥ 10%: Xi dráždivý, dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Možná senzibilizace při kontaktu s pokožkou. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice.

