



# BODE- Eurospender 2000



## Čištění a dezinfekce

Při **každé výměně láhve** by se měl dávkovač včetně pumpičky vyčistit a vydezinfikovat.

### Čištění a dezinfekce dávkovače

- Stisknutím zajišťovacího jazýčku odstraňte přední část dávkovače
- Vyjměte láhev a dávkovací pumpičku
- Přední část dávkovače důkladně očistěte pod tekoucí horkou vodou, aby na něm nezůstaly žádné viditelné zbytky přípravku
- Zadní přišroubovanou část dávkovače vyčistěte navlhčenými ubrousky na jedno použití
- Obě části dávkovače postříkejte alkoholovým přípravkem na dezinfekci povrchů, v případě potřeby následně otřete ubrouskem na jedno použití; dodržte dobu působení
- Nasadte novou nebo vyčištěnou dávkovací pumpičku (viz níže) a nasuňte kryt
- Vložte novou láhev a stlačením pumpičky nasajte přípravek

### Čištění a dezinfekce pumpičky

- Pumpičku nejprve propláchněte horkou vodou a zbavte všech zbytků přípravku
- Propláchněte alkoholovým přípravkem na dezinfekci ploch a nechte 5 minut působit
- Poté odčerpejte z pumpičky veškerou kapalinu
- Po úplném oschnutí pumpičku znovu nasadte nebo uskladněte tak, aby se na ni neprášilo

Poznámka: Nepoužívejte abrasivní prostředky ani leptající čisticí přípravky.