

Visirub®

Fluoreskující testovací emulze pro odhalení nedostatků v dezinfekci rukou a odhalení kontaminačních cest.

Návod k použití:

1. Celý obsah lahvičky Visirub® vlijte do láhve dezinfekčního přípravku [Sterillium® 500 ml](#) (není součástí balení).
2. Uzavřete láhev Sterillia a promíchejte.
3. Označte láhev Sterillia etiketou na přední i zadní straně (jsou dodávány spolu s Visirubem)



Odhalování nedostatků v dezinfekci:

1. Nalijte dostatečné množství roztoku Visirub® do dlaně a vtírejte, jako byste prováděli hygienickou dezinfekci rukou.
2. Až jsou ruce suché, osvětlete je ultrafialovým (UV) světlem, např. v [Dermaluxu](#), nebo [Derma LiteCheck Boxu](#).
3. Místa, která byla potřena, se jeví bílá, naopak nedostatečně potřena nebo nepotřená místa na ruce jsou tmavá.

Odhalování kontaminačních cest:

1. Nenápadně navlhčete roztokem Visirubu místo, které bude zdrojem "kontaminace" (Vaše ruka, klika, ...).
2. Dokud je potřené místo vlhké, nechte na ně pokusnou osobu sáhnout rukou.
4. Osvětlete ruku pokusné osoby UV světlem, např. v [Dermaluxu](#), nebo [Derma LiteCheck Boxu](#).
5. Světlá místa demonstrují kontaminaci rukou dotykem.



Doporučená prodejní cena:

10ml **140,83 Kč** bez DPH
170,00 Kč s DPH (20%)

Objednací číslo: 975820 tuba 10 ml, balení 5 ks

Bode s.r.o.

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
 tel.: 227 027 378, fax: 227 027 379
 e-mail: info@bode.cz
www.bode.cz



A company of the
 HARTMANN GROUP

HARTMANN

